


TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

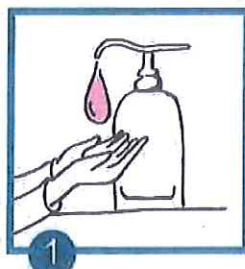


1 Vydezinfikuješ si ruce




2 Posadíš se ke stolu




3 Dostaneš instruktaž

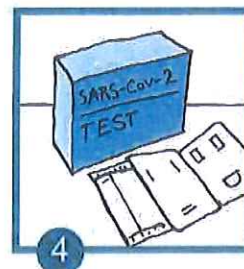


4 Rozbalíš si test

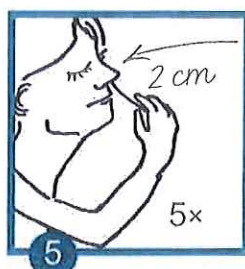

5 Tyčinkou 5x otočíš v každé nosní dírce

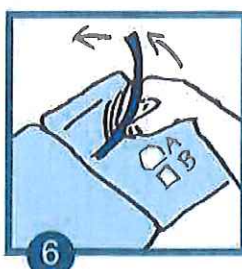


6 Odstraníš fólii z testu

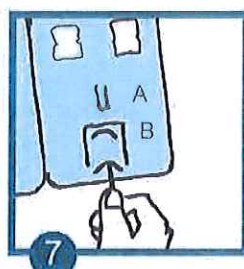


7 Prostrčíš konec tyčinky otvorem B do A



8 Test se zakape roztokem

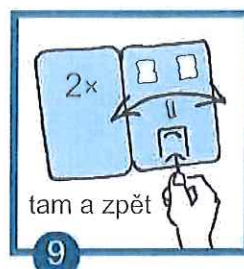


9 Otočíš 2x tyčinkou tam a zpět

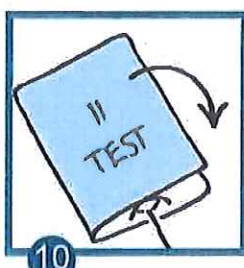

10 Zavřeš test



11 Stopujeme 15 minut

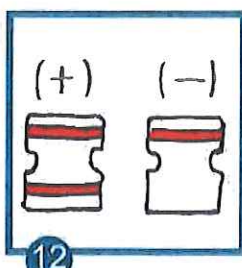

12 A máš tu výsledek



13 Ukazuje to něco jiného? Výsledek se zaznamená test je neplatný, musíš se otestovat znovu



14



15 Test vyhodíš a vydezinfikuješ si ruce



16 Jsi negativní: pokračuješ do výuky s ostatními



17 Jsi pozitivní: počkáš na rodiče a jдете domů




18 Škola ti vystaví potvrzení o tom, že ti test vyšel pozitivně




TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách

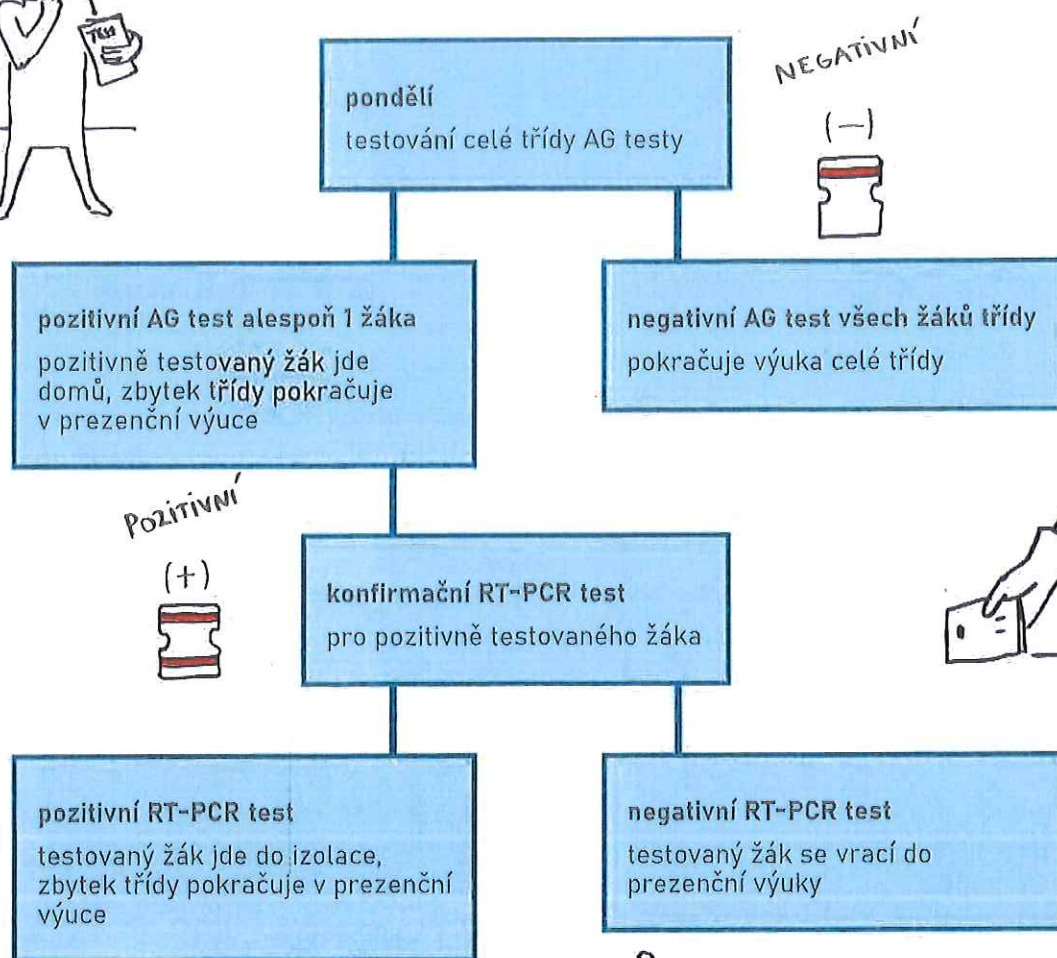

další informace najdete na
<https://testovani.edu.cz/>

TESTUJEME SE, ABY VE ŠKOLE BYLO BEZPEČNO

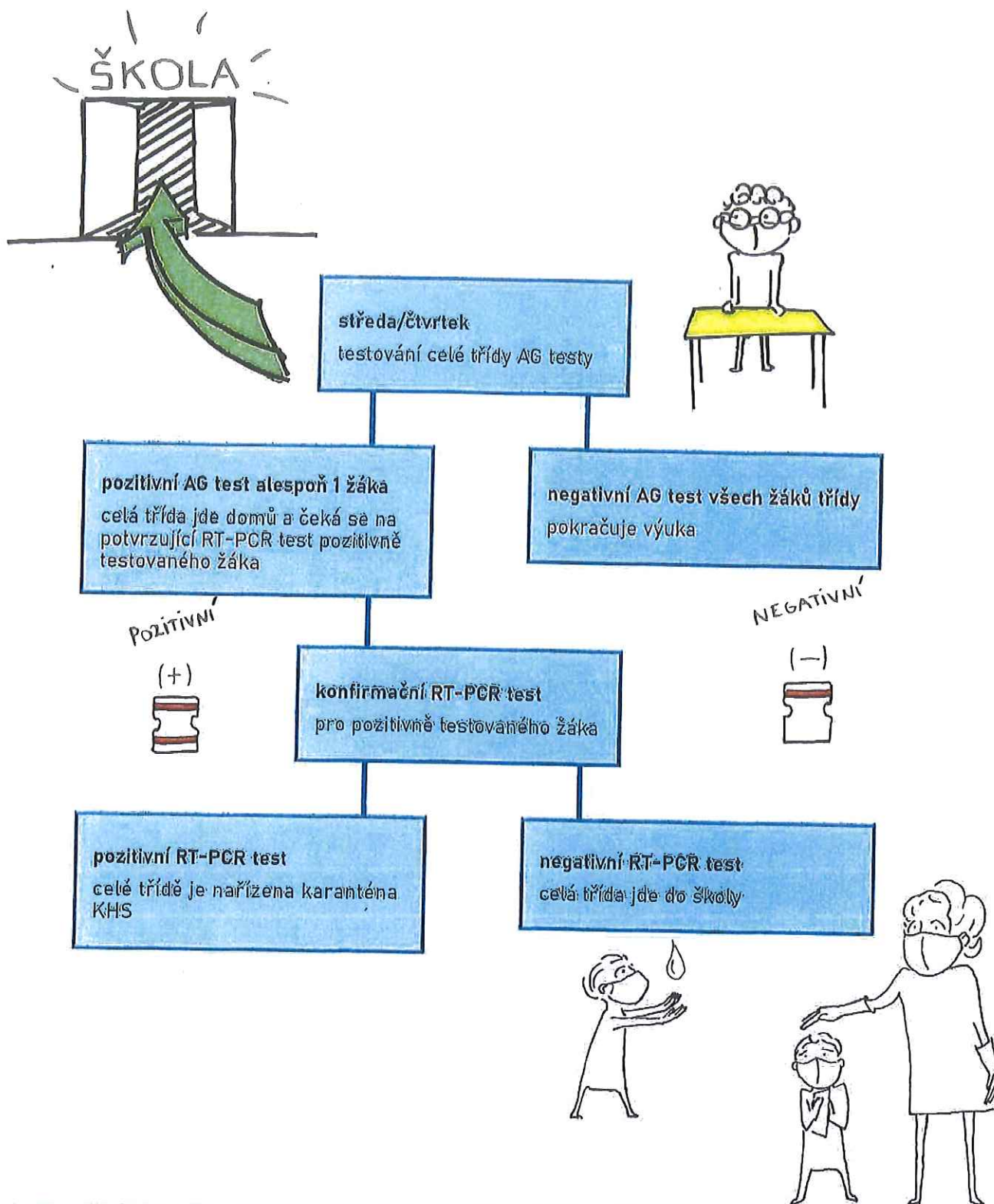

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Národní pedagogický institut
České republiky